

Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия)
и волос (трихоскопия) под увеличением

ASL (Aramo Smart Lite)


Приложение 2 к инструкции:
добавление продукции в программу Solutionist



Мировой лидер среди систем диагностики кожи и волос

www.aramhuvis.com

Добавление продукции

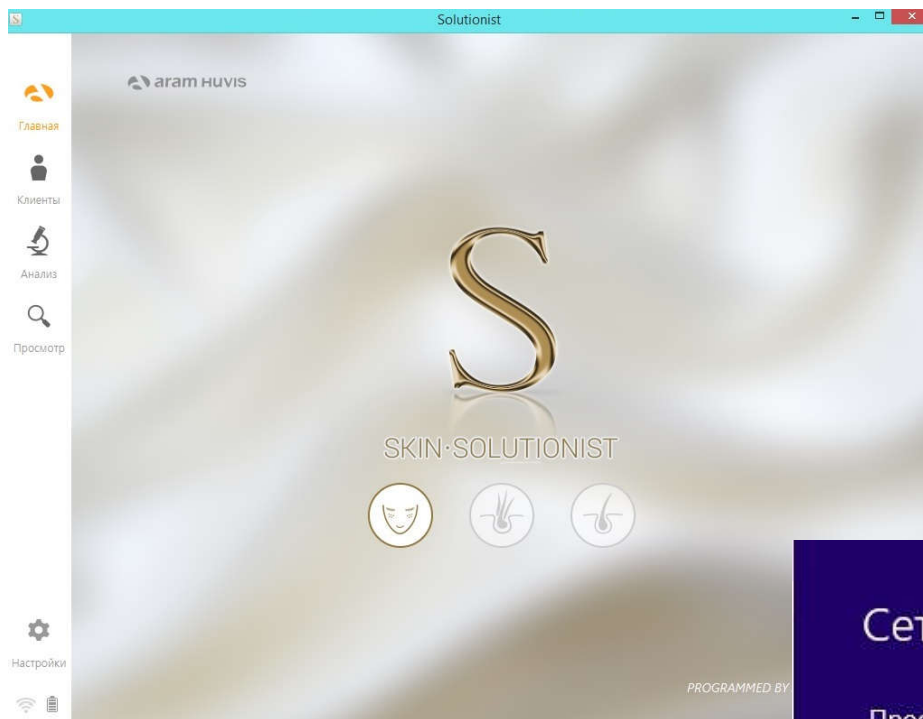

1. Загрузите и откройте программу Solutionist

2. Когда Вы откроете программу первый раз меню будет не активным

3. После включения аппарата ASL, перейдите в сетевые настройки, чтобы настроить Wi-Fi соединение. В списке Wi-Fi найдите имя "ASL-XXXX" и выберите его.

4. Введите ключ безопасности сети (PW)

Сети

Просмотр параметров подключения

Беспроводная сеть

nz
Подключено

AndroidAP

ASL_2C65

← Сети



ASL_2C65

Введите ключ безопасности сети


Далее

Отмена

Добавление продукции

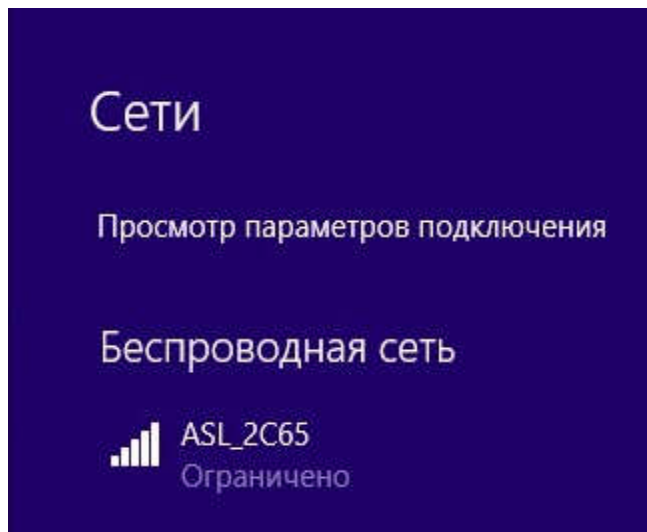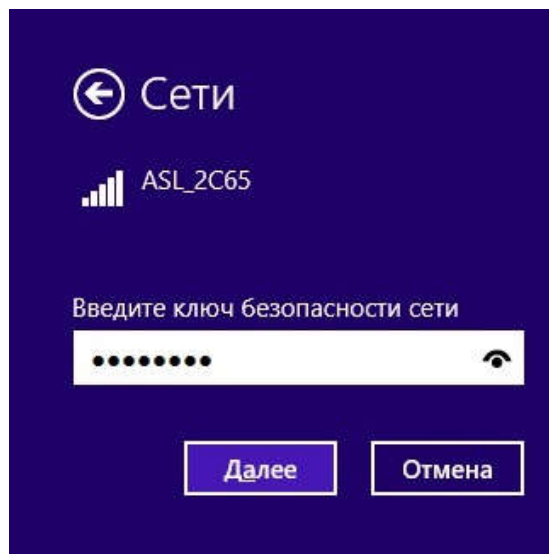


5.Аппарат ASL подключен к компьютеру по Wi-Fi сети

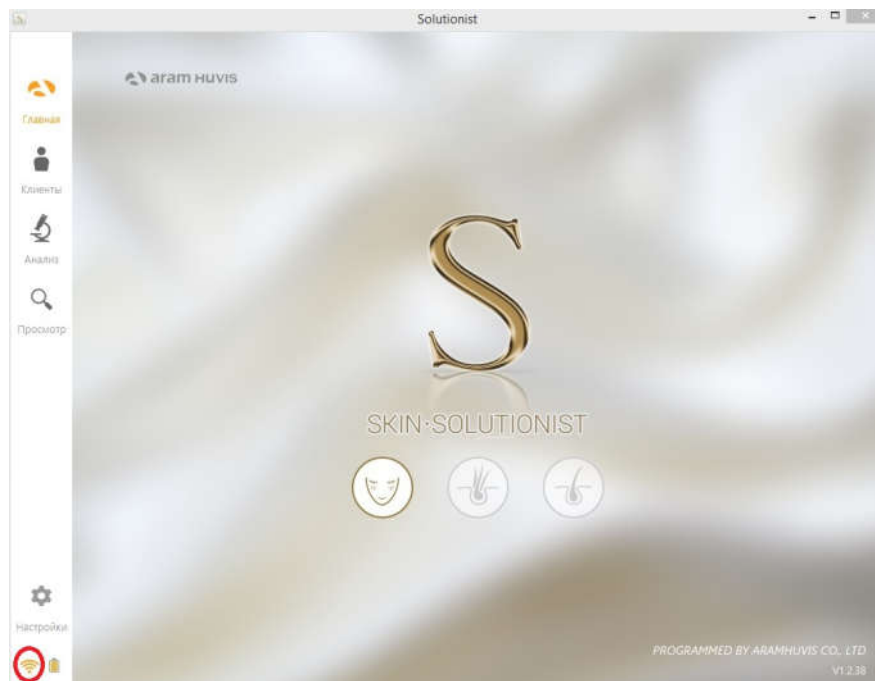


6.После соединения запустите программу Solutionist

7.Для проверки правильной работы программы посмотрите в левый нижний угол. Если все правильно настроено, Вы увидите сигнал Wi-Fi бежевого (для Solutionist Skin – режим диагностики кожи) или серого цвета (для Solutionist Hair –режим диагностики волос).

Добавление продукции

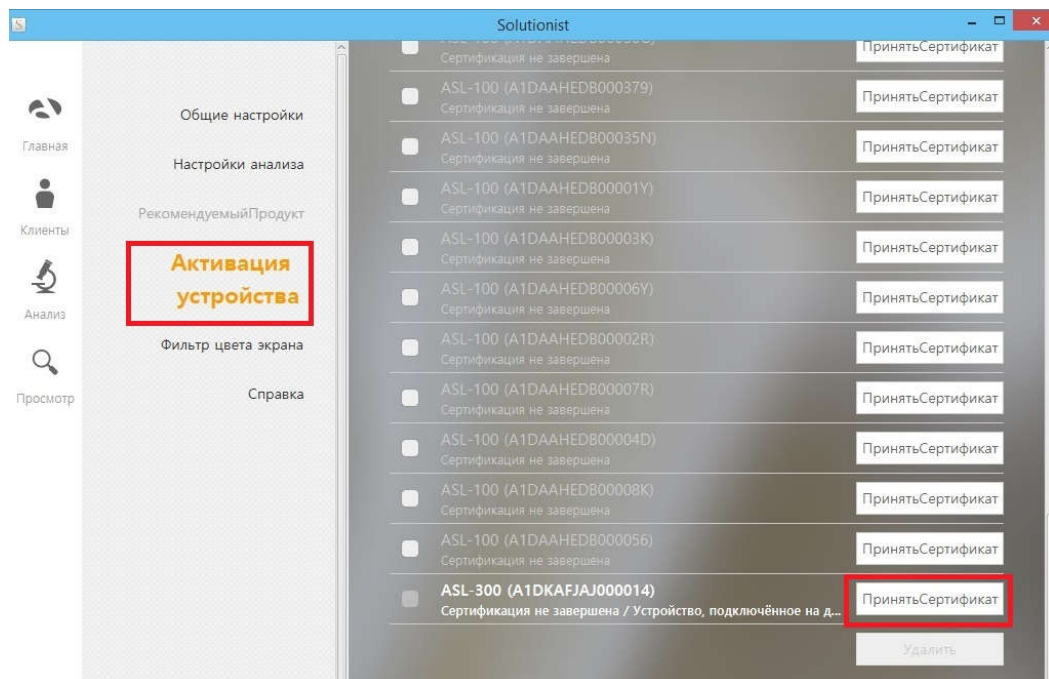


8. Аппарат автоматически появится в списке подключенных устройств в разделе «Активация устройства». Чтобы использовать устройство необходимо его активировать (Принять сертификат). Но принять сертификат невозможно если, устройство соединено по Wi-Fi с программой Solutionist.

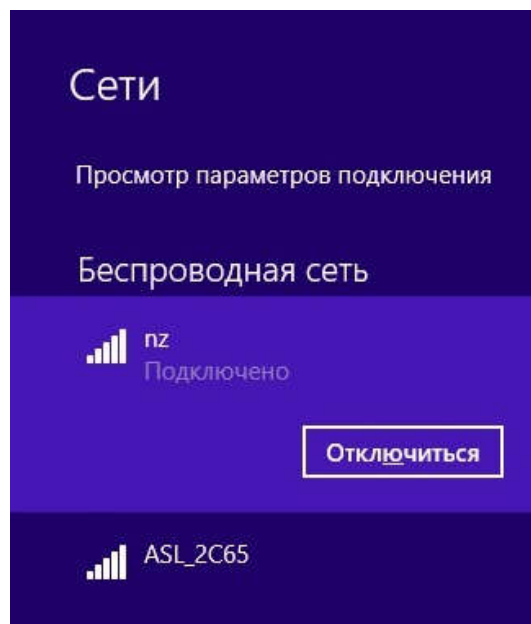


9. Откройте список доступных Wi-Fi соединений и подключитесь к публичной сети или к сети в офисе. Аппарат будет отключен от программы.

Добавление продукции

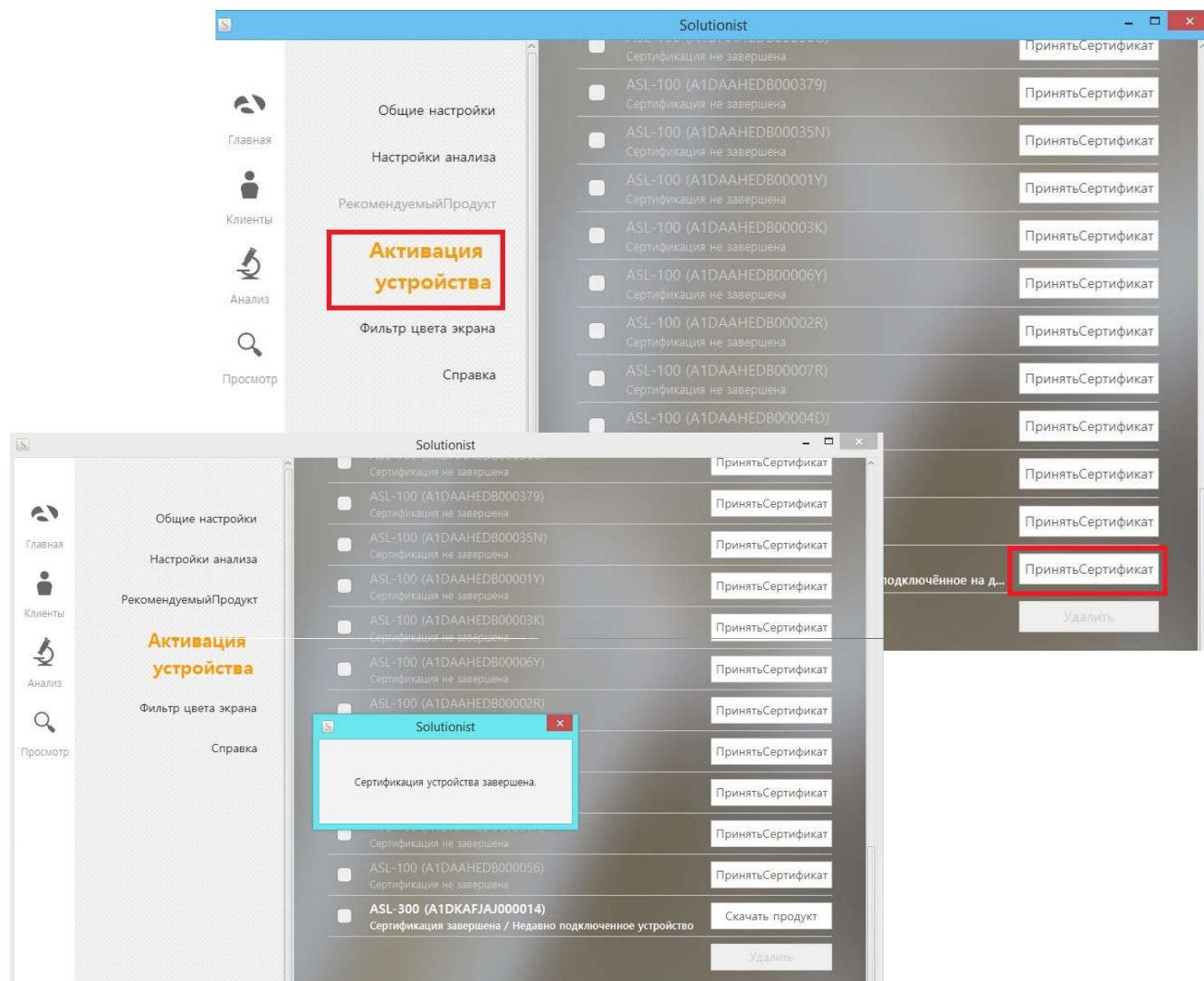

10. Откройте еще раз программу Solutinist и выберите раздел «Активация Устройства» на странице «Настройки». Нажмите на кнопку «Принять Сертификат»
11. После получения сертификата появится сообщение «Сертификация устройства завершена»
12. Зайдите в раздел «Рекомендуемый продукт» на странице «Настройки»

Добавление продукции

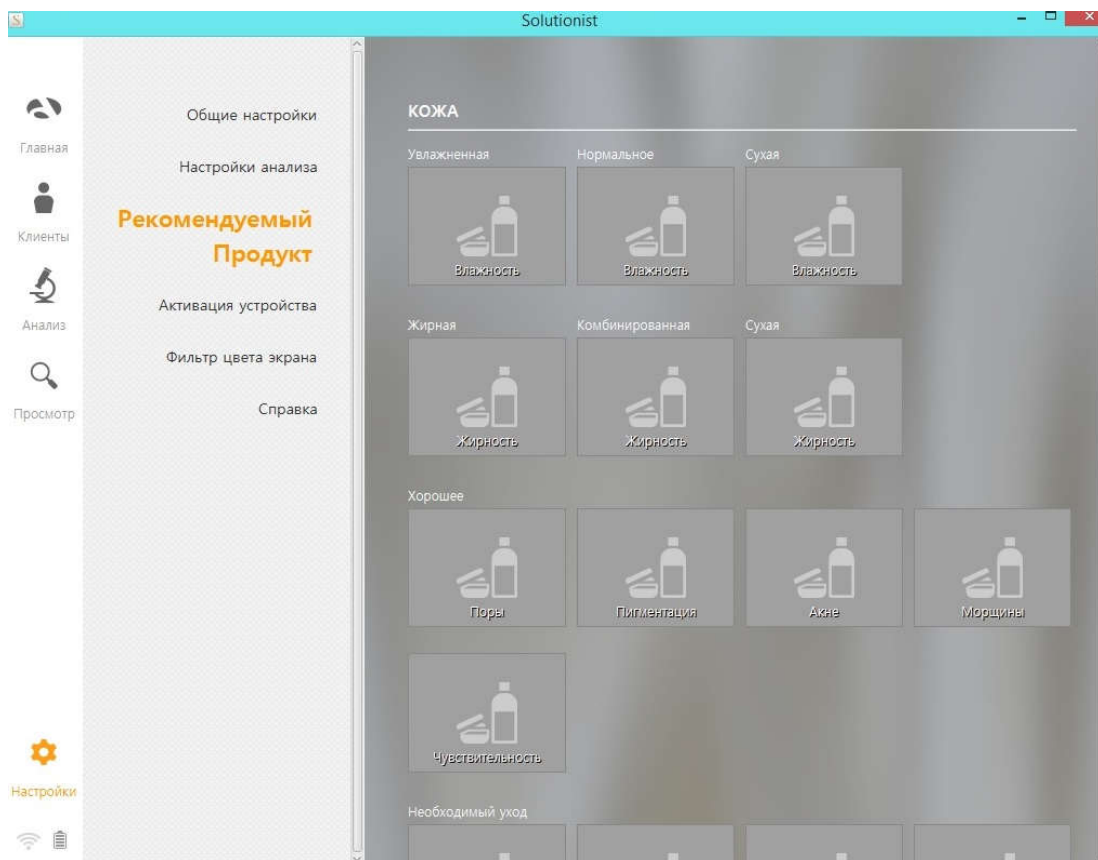

13. Чтобы добавить фото кликните мышкой в соответствующее окно

14. **Влажность кожи:** Увлажненная кожа, Нормальное состояние, Сухая кожа. В каждый раздел можно внести одно фото.

Рекомендованный размер 1024x1024 или 2048x2048.

Изображение должно быть в формате jpeg

15. **Жирность кожи:** Жирная, Комбинированная, Сухая. . В каждый Раздел можно внести одно фото. Рекомендованный размер 1024x1024 или 2048x2048. Изображение должно быть в формате jpeg


16. **Поры, Пигментация, Акне, Морщины, Чувствительность:**

Хорошее состояние, Необходим уход, Интенсивный уход. . В каждый раздел можно внести одно фото. Рекомендованный размер 1024x1024 или 2048x2048. Изображение должно быть в формате jpeg


17. Выберите изображение, которое Вы хотите вставить

18. Выбранное изображение появится в соответствующем окне

Добавление продукции

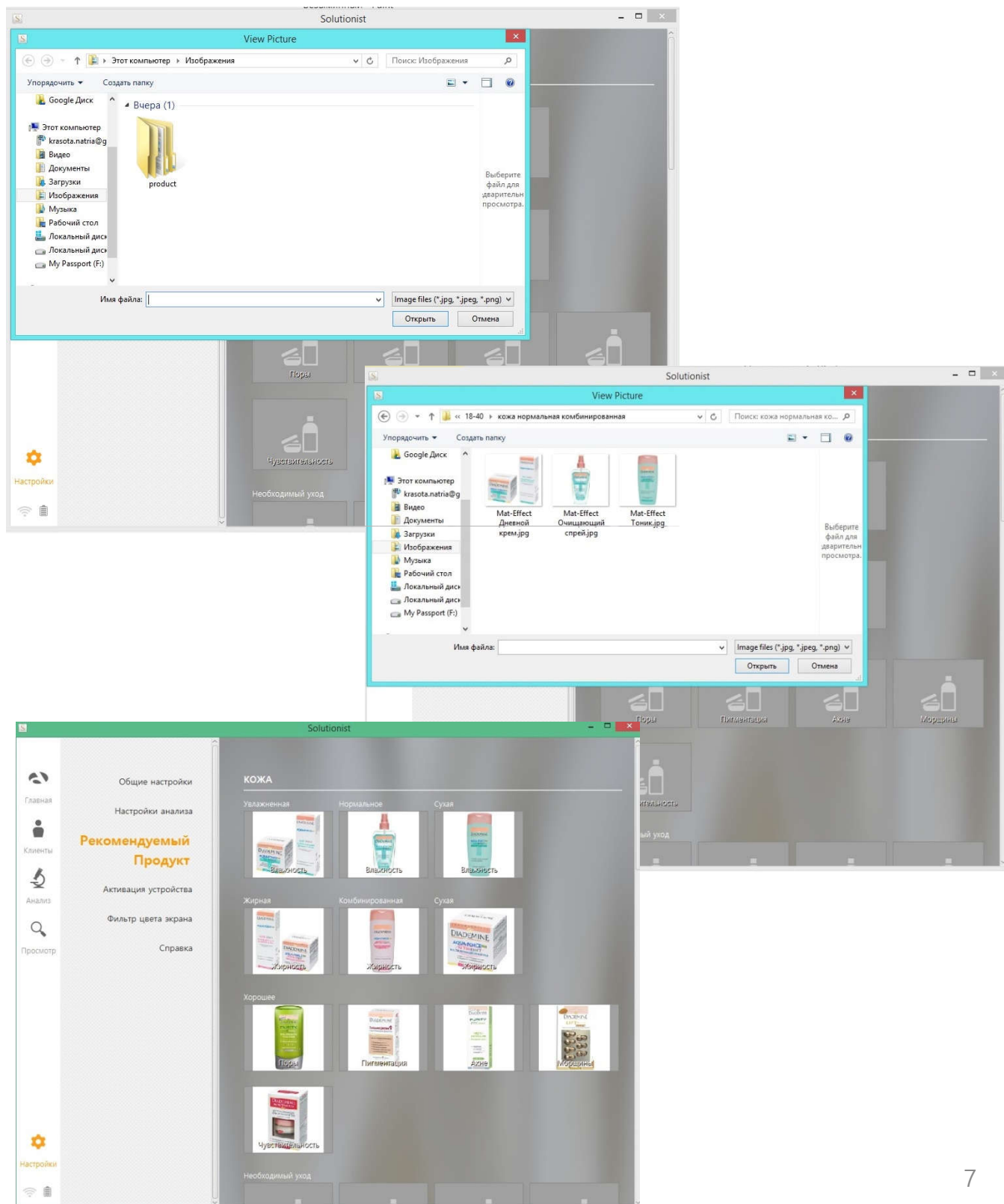

Добавление продукции

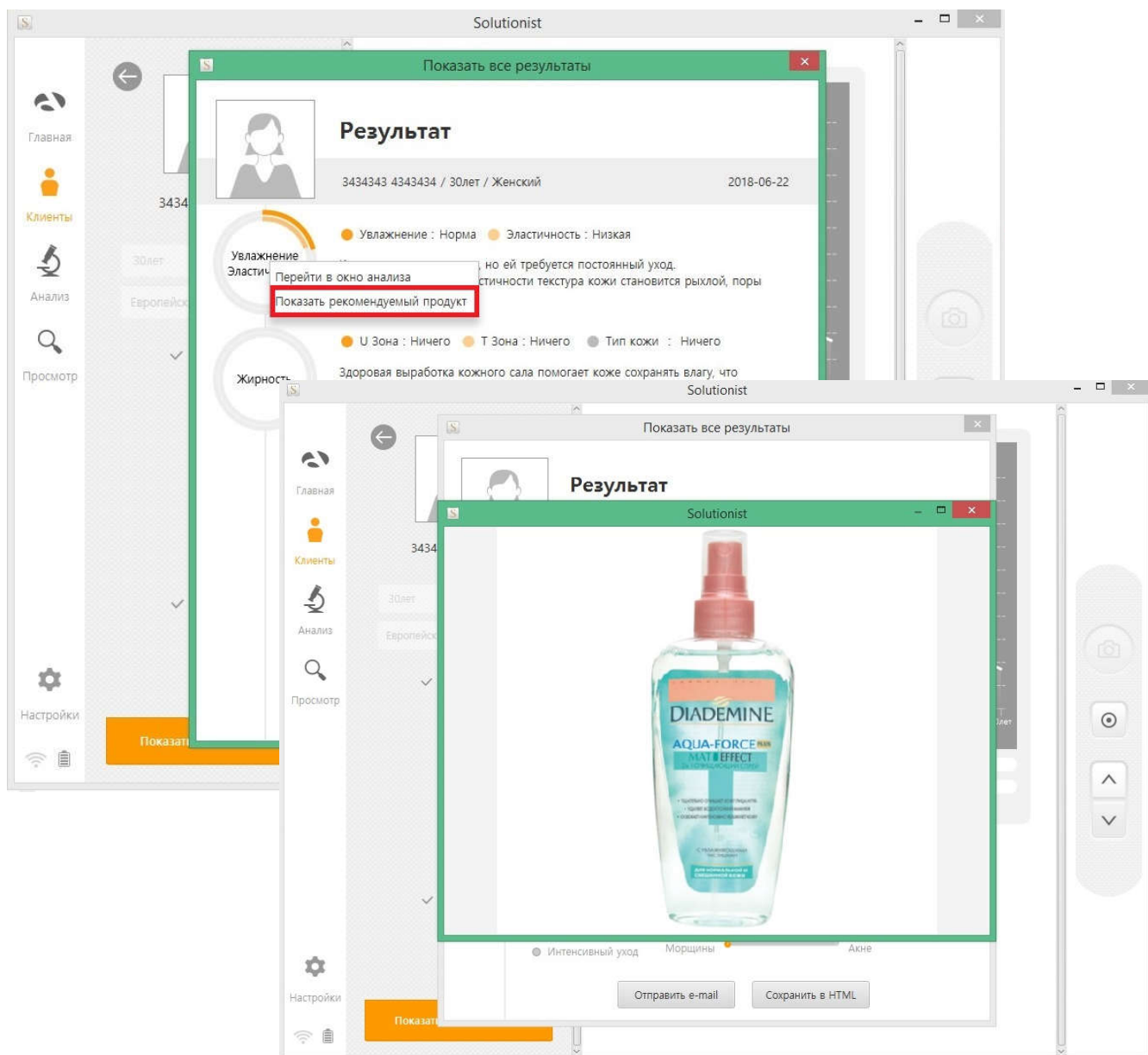

19. После завершения диагностики зайдите на страницу «Результат». Выберите исследуемый параметр на диаграмме (Поры, Пигментация, Акне, Морщины, Чувствительность) или на графике (Увлажнение, Жирность) и кликните мышкой. В открывшемся окне выберите «Показать Рекомендуемый Продукт»
20. Откроется окно с изображением, которое Вы загрузили.

Добавление продукции

